


手動式
鼻水吸引器

スイスイ
Suisui

セット内容

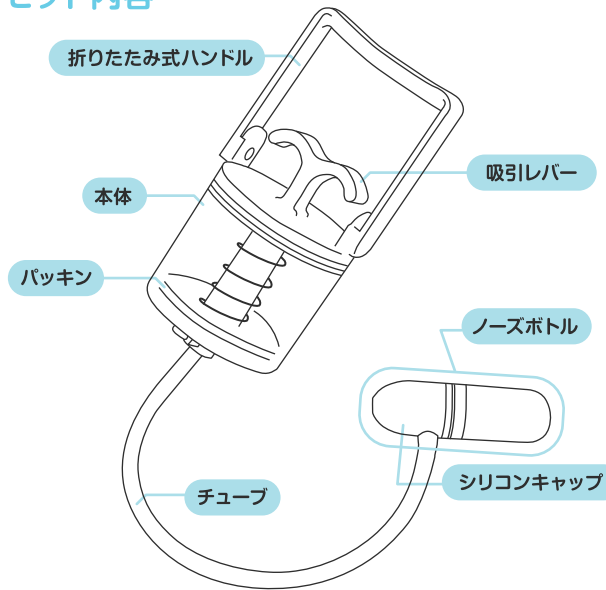

消毒方法

パーツ	煮沸	電子レンジ	薬液
本体	○	○	○
ノーズボトル	○	○	○
シリコンキャップ・チューブ	○	○	○
パッキン	○	○	○

★本体、ノーズボトルの耐熱温度は120℃です。
★各パーツは、個別でお買い求めいただけます。


- 基本的に使用後はノーズボトルとシリコンキャップのみ洗浄します。洗浄後は水分をよく拭き取ってください。
ノーズボトルとシリコンキャップは分離できます。
- 吸引口に付着した鼻そが取れない場合は、ストロー用ブラシやピンセット、綿棒などを使用し取り除いてください。
- チューブが汚れた場合は、本体から外して洗浄してください。
- パッキン、本体内部が汚れた場合は、本体を開けて汚れを洗浄し、最後に必ず潤滑油(ベビーオイルまたはサラダ油)を内側に塗布してください。

裏面もご確認ください▶

使用前に必ずご確認ください

- 本品は、吸引レバーの動作確認用に少量の潤滑油を塗布しております。ご購入時には、潤滑油が乾いて動作がスムーズでない場合がございます。
- 必ずご使用前に、本体を開けて、パッキンと本体の内側全体に新しい潤滑油(ベビーオイルまたはサラダ油)を塗布してください。(下図参照)
- ※潤滑油は、使用頻度により消耗します。吸引レバーが重く感じたら、潤滑油を塗布してください。

●潤滑油の塗り方(本体)

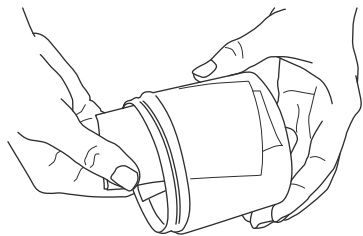

使用方法

ノーズボトルの吸引口を鼻孔に当てて、**吸引レバー**を引き、鼻水を吸引します。



- 吸引力は吸引レバーを引くスピードと引く距離で調節できます。速く引くと吸引力は強くなります。最初は吸引レバーをゆっくりと引いて、お子様の鼻水の状態を見ながら調整してください。

★両方の鼻が詰まっている場合は、無理な吸引はお控えください。

- ノーズボトルの吸引口は真上に向けず、少し斜めの角度、やや水平気味にするとよく取れます。(図1参照)
真上の状態では、吸引口が小鼻を吸い、吸引レバーが重くなります。
その場合は、吸引口の角度を少しずつ変えながら吸引してください。

※お子様が嫌がって動く場合は、図2のようにお子様の頭を固定し、吸引口を優しく鼻孔に当てて吸引してください。

※お子様が怖がる場合は、吸引する前にノーズボトルを手に触れさせてみるなど、恐怖心を取り除いてからご使用ください。嫌がって泣き叫ぶような場合は、無理に吸引せず、就寝時にご使用ください。

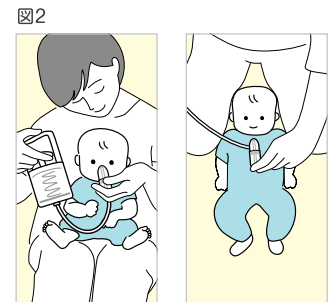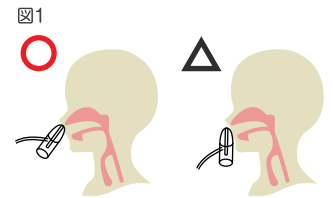

片方の手で抑える

太ももで固定する

よくある質問

Q 吸引レバーが重い

ノーズボトルの吸引口が完全に塞がれていないか、チューブが折れ曲がっていないかご確認ください。

上記に該当しない場合は、本体の内側に潤滑油を塗布してください。(詳しくは裏面の●潤滑油の塗り方をご確認ください。)

※アレルギーなどの炎症で粘膜が腫れている場合も吸引レバーが引きづらくなりますので、無理な吸引はお控えください。

Q 本体がヌルヌルします

吸引レバーの動作確認用の潤滑油が、稀に本体に付着している場合があります。

手についても問題はありますが、よく拭き取ってからご使用ください。

Q 吸引力が弱い/できない


空気が漏れている可能性があります。

●チューブがノーズボトルまたは本体としっかり接続されているかご確認ください。


●弁が2箇所ついているかご確認ください。

★「弁」は本体底の内側と外側、2箇所についています。

〈内側〉

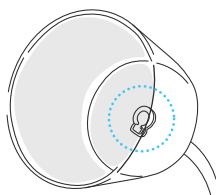


〈外側〉

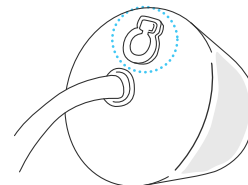

逆流に関する注意事項と対処方法

【ノーズボトルの正しい持ち方】

●チューブへの逆流を防ぐために、ノーズボトルとチューブの接続部分と吸引口が上を向くように持ってください。(図1)

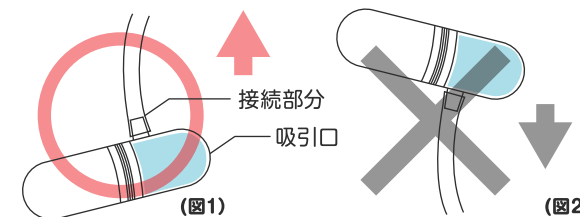

●ノーズボトルは、逆流しにくい構造になっていますが、鼻水が溜った状態で上下逆さまにすると、チューブに逆流する場合があります。(図2)

●ノーズボトルの底に鼻水が大量に溜った状態で吸引を続けると、逆流する場合があります。鼻水がノーズボトルの底から2cm程度溜ったら、途中で洗浄し吸引を続けてください。

使用上の注意

使用前に必ずご確認ください

- ①ご購入後は必ず全パーツが入っているか確認していただき、本製品を洗浄の上、本体の内側に潤滑油(ベビーオイルまたはサラダ油)を塗布してご使用ください。数回レバーを上げ下げするとスムーズにご使用いただけます。
- ②鼻腔内に、炎症や傷がある場合は使用しないでください。
- ③乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ④鼻水吸引の用途以外には、使用しないでください。
- ⑤直射日光、高温多湿の場所を避け、清潔な場所に保管してください。

⚠ 鼻づまりは解消できません

●液状の鼻水しか吸引できません。鼻水が鼻の奥で詰まっていたり、固まっていたりする場合は吸引することができません。

お風呂上がりは湯気で血行が促進され鼻の通りが良くなり、鼻の粘膜も湿るため吸いやすくなる場合があります。

●乾燥した硬い鼻くそ吸引は、鼻の粘膜を傷つける可能性がありますのでお控えください。


お風呂あがりは
吸いやすくなります



パーツ販売案内

各パーツは、弊社オンラインサイトにてご購入いただけます。詳しくは、右側の二次元コードまたはホームページをご覧ください。

- パッキン ■弁 ■チューブ ■ノーズボトル

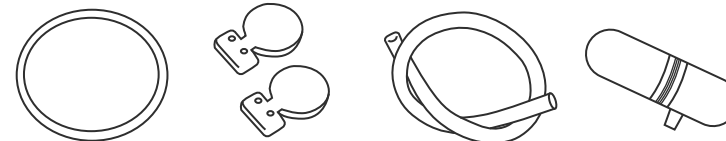

※パッキンは材質の都合上、稀に黒い点が付着している場合がございますが、商品自体に問題はありません。

●材質表示

パーツ	材質
本体・吸引レバー・ハンドル・ノーズボトル	ポリプロピレン
シリコンキャップ・チューブ	シリコンゴム
パッキン	NBR
弁	シリコンゴム/ポリプロピレン
パネ	ステンレス

製造販売元：株式会社ビタットジャパン
〒187-0035東京都小平市小川西町3-19-16

お問い合わせ先：042-332-7262

▼詳しくはコチラ

- ・使用方法
- ・パーツ購入
- ・商品に関するQ&A



MADE IN KOREA

